

Birkholz und Mohns Dentallabor – Lehnitzstraße 21 – 16515 Oranienburg

## Liebes Praxisteam

Information zu unseren Bohrschablonen

Bitte beachten Sie, dass die Bohrschablonen vorab desinfiziert werden und aus Hygienischen Gründen eingeschweißt werden.

Eine Sterilisation muss jedoch in der Zahnarztpraxis erfolgen! **MAXIMAL 121°C**

### Technische Daten:

Name	SHERAprint-ortho plus / UV
Hersteller	Shera Dental

### Anwendung:

Start Entlüften	-0,86 bar
Dampfinjektion	+0,10 bar
Entlüften	-0,84 bar
Dampfinjektion	+0,50 bar
Entlüften	-0,83 bar
Aufheizen	
Sterilisieren	<b>121°C</b> ; 1,06 – 1,08 bar; 15 Minuten
Druckentlastung	
Trocknen	24 Minuten
Belüften	
Ende	

Bei Rückfragen können Sie uns gern kontaktieren.

0151 / 644 644 10	Florian Birkholz
03301 / 577 30 10	Dentallabor

