



Information zu unseren Bohrschablonen

Bitte beachten Sie, dass die Bohrschablonen vorab desinfiziert werden und aus Hygienischen Gründen eingeschweißt werden.

Eine Sterilisation muss jedoch in der Zahnarztpraxis erfolgen! **MAXIMAL 121°C**

Technische Daten:

Name	SHERAprint-ortho plus / UV
Hersteller	Shera Dental

Anwendung:

Start Entlüften	-0,86 bar
Dampfinjektion	+0,10 bar
Entlüften	-0,84 bar
Dampfinjektion	+0,50 bar
Entlüften	-0,83 bar
Aufheizen	

Sterilisieren	121°C; 1,06 – 1,08 bar; 15 Minuten
Druckentlastung	

Trocknen	24 Minuten
Belüften	
Ende	